


SARSコロナウイルス抗原キット ご使用方法 -表面-

① 検体採取


綿棒を袋から取り出します。

× 綿球を手で触らないようにしてください

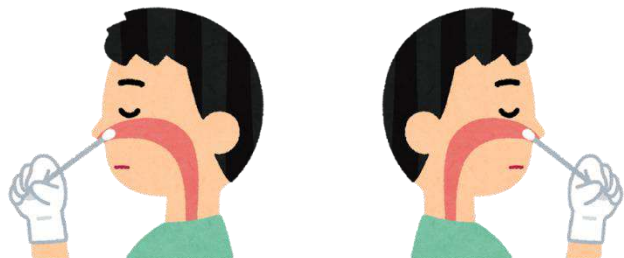


鼻の中**2cmほど**（綿球が鼻の中に隠れるくらい）挿入し、鼻腔壁に沿って綿棒を15秒程回転させます。同じ綿棒で**両方の鼻**から検体を採取します

× 多量の出血や過度な鼻汁の付着は避けます

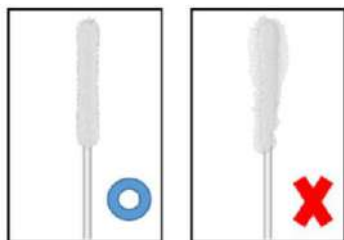

② 試料調製

抽出用バッファチューブの蓋シールを開け、**(A)** 検体採取した綿棒を入れ、**10回以上もみほぐします**

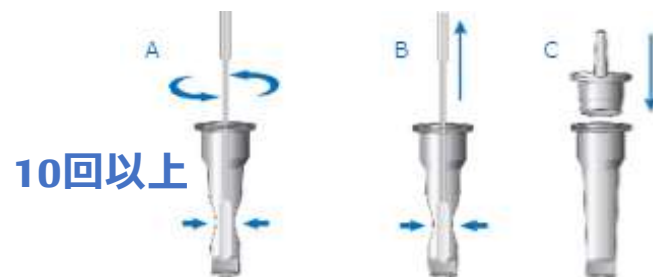

(B) 検体を絞り出すように、チューブから綿棒を引き抜きます

(C) ノズルキャップをチューブに押し込み、しっかりと締めます

こちらで動画をご覧ください



SARSコロナウイルス抗原キット ご使用方法 -裏面-

③ 検体滴下

テストデバイスの検体滴下孔（丸い穴）へ、チューブから検体を3滴垂らします。



C (コントロール) ライン:
測定が正しく行われたことを示す
T (テスト) ライン:
コロナウイルス抗原が検出されたことを示す

- 垂直・真上から滴下
 - × 検体量が足りない
- 泡になってしまっても、十分量滴下されれば検査可能です


検体滴下から、時間を測ります⌚

④ 結果判定

検体滴下から
15分後以降、30分以内の間は
いつでも結果判定ができます




陽性

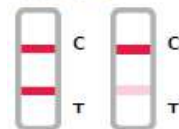

医療機関を受診してください




陰性

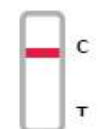

症状あれば受診、
症状ない場合も、
基本的な感染対策を継続



無効

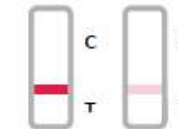

Cラインが出ない場合、
測定は無効

使用後は、ごみ袋に入れ、しばって封をした状態で、自治体のルールに従い廃棄して下さい